

Tutorial

PRODESP SSI **Instalação Serviço Interface**

Jul/2014
Versão 2.0

	TUTORIAL Instalação Serviço Interface	
PRODESP - Instalação Serviço Interface		PÁG.: 2 de 9

SUMÁRIO

1.	INTRODUÇÃO.....	3
2.	CONTEXTO DO NEGÓCIO.....	3
3.	PROPOSIÇÃO E ESCOPO.....	3
3.1.	INSTALAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERFACE.....	3
3.2.	ARQUIVOS DE INICIALIZAÇÃO.....	4
4.	PROCEDIMENTOS DE INSTALAÇÃO.....	5
5.	ANEXOS.....	5
5.1	ANEXO A – LAY-OUT ARQUIVO IDA	5
5.1	ANEXO B – LAY-OUT ARQUIVO VOLTA	5
5.1	ANEXO C - TOPOLOGIA	6

1. INTRODUÇÃO

Este documento tem como objetivo orientar o usuário para a Instalação do “Serviço de interface”.

2. CONTEXTO DO NEGÓCIO

O Serviço de Interface tem a finalidade de comunicar o Sistema de Laboratório Sigh-Lab com o Sistema de Interface em uso pelo cliente (Laboratório).


Tipo	Tecnologia	Justificativa
Linguagem de programação	Delphi	
Banco de dados	Oracle 11g	
Servidor Windows		
Protocolo ASTM		

3. PROPOSIÇÃO E ESCOPO

3.1. Para instalação do Serviço de Interface, será necessário:

- Criação das Pastas:
 - SIGHLAB
 - SIGHLAB\SERVICOS
 - SIGHLAB\SERVICOS\LABIDA
 - SIGHLAB\SERVICOS\LABVOLTA
 - SIGHLAB\SERVICOS\LABCONTROLE
 - SIGHLAB\TM_IDA
 - SIGHLAB\ TM_IDA_OK
 - SIGHLAB\ TM_VOLTA
 - SIGHLAB\ TM_VOLTA_OK
 - SIGHLAB\ TM_REENVIAR
 - Instalação do Oracle e BDE;
 - Nas pastas labida e labvolta:
 - Executar a aplicação C:\gerachavebd.exe, na pasta SERVICOS, e copiar a chave nos arquivos labida.ini e labvolta.ini.
- A mesma chave serve para os dois arquivos.

	TUTORIAL Instalação Serviço Interface	
PRODESP - Instalação Serviço Interface		PÁG.: 4 de 9

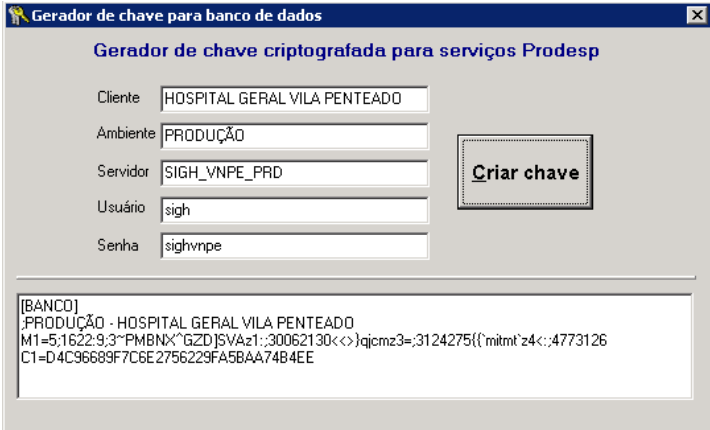

Gerador de chave para banco de dados

Gerador de chave criptografada para serviços Prodesp

Cliente: HOSPITAL GERAL VILA PENTEADO
 Ambiente: PRODUÇÃO
 Servidor: SIGH_VNPE_PRD
 Usuário: sigh
 Senha: sighvnpe

Criar chave

[BANCO]
 ,PRODUÇÃO - HOSPITAL GERAL VILA PENTEADO
 M1=5:1622:9:3~PMBN~GZDJSVAz1:30062130<> }qicmz3=:3124275({ mitmt'z4<:4773126
 C1=D4C96689F7C6E2756229FA5BAA74B4EE

- Alterar os arquivos labida.ini e labvolta.ini, para as configurações locais (Servidor, Banco, etc) ver itens 3.2 e 3.3;
- Verificar o serviço no banco, rodar o select: LAB_TEMP_INTERFACE_IDA.

Atenção: O BDE TEM QUE SER CONFIGURADO COM O SQLORA32.DLL, SENÃO NÃO RODA O SERVIÇO DE VOLTA.

3.2. Arquivos de inicialização

```

Lablda.ini - Bloco de notas
Arquivo  Editar  Formatar  Exibir  Ajuda

[SERVIDOR]
LOTE_AMOSTRA=50
SOFTWARE=PRODESP

[BANCO]
;produção - OSAS
M1=2>2;=79<<6yUNOAUD_LWZVULu<9>45731<=<=799xvo` `u>>>44511.:vxejljuf{u9??<1020<=;
C1=628D861149AB49CD2EAD3A83D933DD64

[PRODESP]
IDA=C:\SIGH-LAB\TM_IDA
IDA_OK=C:\SIGH-LAB\TM_IDA_OK
ARQUIVO_OK=NAO

```

	TUTORIAL Instalação Serviço Interface	
PRODESP - Instalação Serviço Interface		PÁG.: 5 de 9

```

LabVolta.ini - Bloco de notas
Arquivo  Editar  Formatar  Exibir  Ajuda

[[SERVIDOR]
ACUMULO_AMOSTRA=1500
LOTE_AMOSTRA=50
SOFTWARE=PRODESP

[BANCO]
;produção - osas
M1=?17888<?!5tzclDRa|qtWyXop; <=>6: <<?9:: ${{'mcp9;=)78><9?q}fwogzkxp>: <!2==?8<
C1=04AAF85416C79013C1FE74FD29007C2F


[EMAIL]
ENVIA_EMAIL=NAO
IP_SMTP=10.65.121.1
AMBIENTE=PRODUÇÃO OSAS
EMAIL_SUORTE=mariocarmo@sp.gov.br
EMAIL_ADMIN=omelo@sp.gov.br,lgcamargo@sp.gov.br,caraujo@sp.gov.br,planca@sp.gov.br

[PRODESP]
VOLTA=C:\SIGH-LAB\TM_VOLTA
VOLTA_OK=C:\SIGH-LAB\TM_VOLTA_OK
REENVIAR=C:\SIGH-LAB\TM_REENVIAR
ARQUIVO_OK=NAO


```

4. PROCEDIMENTO DE INSTALAÇÃO


- Abir o Prompt de comando: Run as administrator (selecionar o prompt como administrador)
- Rodar os comandos: > C:\labida\labida -install
C:\labvolta\labvolta -install
Aguardar resposta da instalação (Instalado com sucesso)

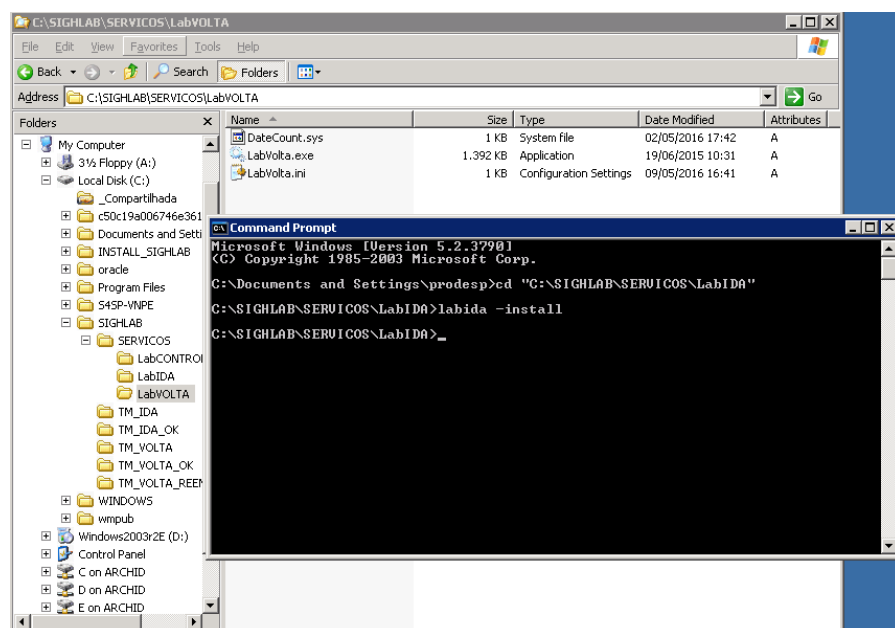

- Copiar o endereço da pasta, colar no prompt ("C:\SIGHLAB\SERVICO\LABIDA") e rodar \labida –install, repetir para \labvolta –install e \labcontrole –install.
- Sempre aparecerá a mensagem abaixo:

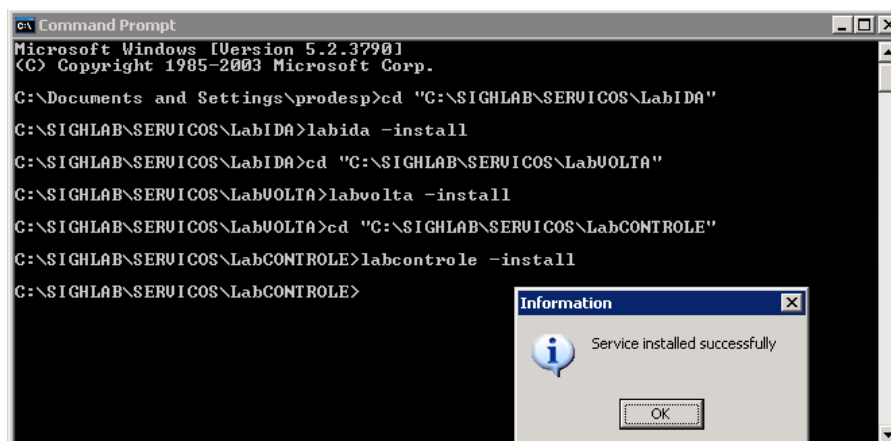

- No Aplicativo 'Serviços', ativar os serviços labida e labvolta (Iniciar)
Importante: Na tela de 'Executar' (linha de comando), digitar services.msc para abrir a tela de serviços, e 'executar como administrador'.
Não iniciar pelo gerenciador de tarefas

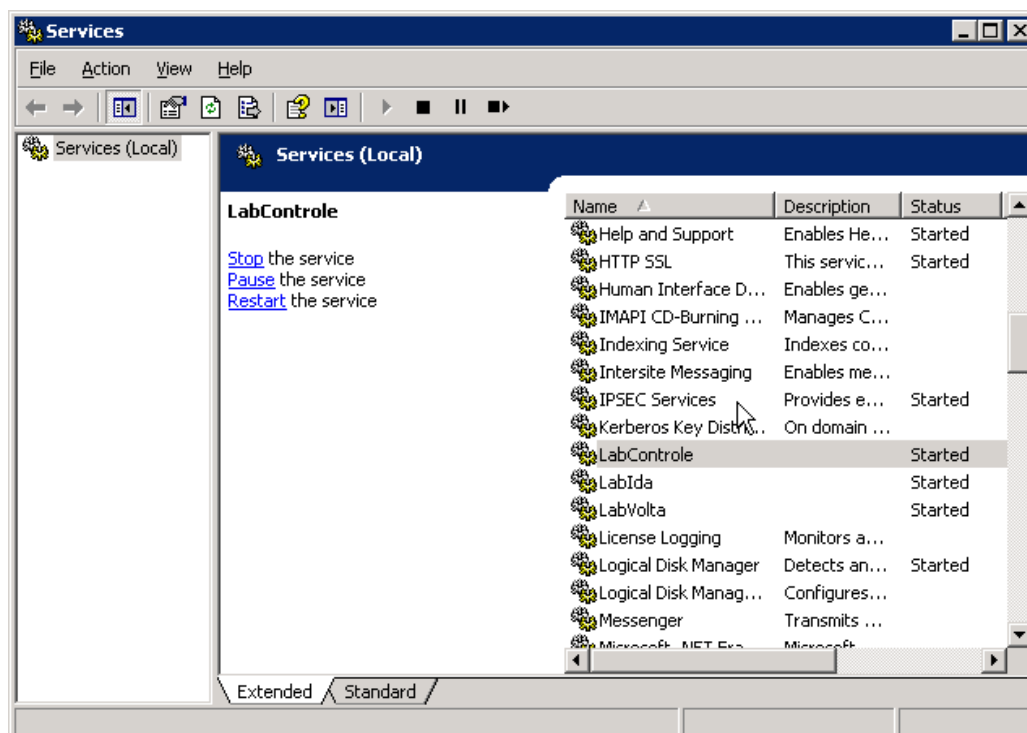

5. ANEXOS

- Anexo A – Layout Arquivo IDA.

```
010028735403 20140530-234012.RES - Bloco de notas
Arquivo  Editar  Formatar  Exibir  Ajuda
H|\A&||SIGH-LAB|||PRODESP||P||
P|1|010028735403|13849053I|EILINOR ROMERO MACHADO|19490722|F|SEMI DADOS CLINICOS...
O|1|010028735403|AAAHMGSAS|2014|||A||SANGUEAASA||A|A|HMA530A1937|||O
O|2|010028735403|AAAPLAQSA|R|2014|||A||SANGUEAASA||A|A|HMA530A1937|||O
L|1|F
```

- Anexo B – Layout Arquivo VOLTA.

```
010028613003_30052014_110704_355.RES - Bloco de notas
Arquivo Editar Formatar Exibir Ajuda
H\A&|||TM INTERFACEA2.0|||||P||20140530110704
P|1|010028613003|13670689K|ANTONIO CODOLO|19370514|M|||||||20140530093459||34344233|||||TOFT ||
R|1|AAAERITSAAAAAXT2000_2-|4,47A||N|F|BI3534||20140530110652|XT2000_2-
R|2|AAAHBSAAAAAXT2000_2-|14,1A||N|F|BI3534||20140530110652|XT2000_2-
R|3|AAAHTSAAAAAXT2000_2-|41,7A||N|F|BI3534||20140530110652|XT2000_2-
R|4|AAAVCMSAAAAAXT2000_2-|93,3A||N|F|BI3534||20140530110652|XT2000_2-
R|5|AAAHCMSAAAAAXT2000_2-|31,5A||N|F|BI3534||20140530110652|XT2000_2-
R|6|AAACHCMSAAAAAXT2000_2-|33,8A||N|F|BI3534||20140530110652|XT2000_2-
R|7|AAARDW-CVAAAAAXT2000_2-|12,7A||N|F|BI3534||20140530110652|XT2000_2-
R|8|AAARDW-SDSAAAAAXT2000_2-|42,5A||N|F|BI3534||20140530110652|XT2000_2-
R|9|AAALEUCSAAAAAXT2000_2-|14,65A||N|F|BI3534||20140530110652|XT2000_2-
R|10|AAANEUTSAAAAAXT2000_2-|12,36A||H|F|BI3534||20140530110652|XT2000_2-
R|11|AAAEOSISAAAAAXT2000_2-|0,01A||N|F|BI3534||20140530110652|XT2000_2-
R|12|AAABASOSAAAAAXT2000_2-|0,03A||N|F|BI3534||20140530110652|XT2000_2-
R|13|AAALINFSAAAAAXT2000_2-|0,77A||L|F|BI3534||20140530110652|XT2000_2-
R|14|AAAMONOSAAAAAXT2000_2-|1,48A||H|F|BI3534||20140530110652|XT2000_2-
R|15|AAANEUTSAAAAAXT2000_2-|84,3A||H|F|BI3534||20140530110652|XT2000_2-
R|16|AAAEOSISAAAAAXT2000_2-|0,1A||N|F|BI3534||20140530110652|XT2000_2-
R|17|AAABASOSAAAAAXT2000_2-|0,2A||N|F|BI3534||20140530110652|XT2000_2-
R|18|AAALINFSAAAAAXT2000_2-|5,3A||L|F|BI3534||20140530110652|XT2000_2-
R|19|AAAMONOSAAAAAXT2000_2-|10,1A||N|F|BI3534||20140530110652|XT2000_2-
C|1|L|E|L|E|A|G
R|1|AAAPLAQSAAAAAAXT2000_2-|274A||N|F|BI3534||20140530110653|XT2000_2-
R|2|AAAVPMSAAAAAXT2000_2-|10,7A||N|F|BI3534||20140530110653|XT2000_2-
C|1|L|E|L|E|A|G
O|1|010028613003||ALL|R|20140530093459||||X|||1|||A|A||||F||||
L|1|N
```

- Anexo C - Topologia

